

GEBRAUCHSANWEISUNG

SWASH[®] BATHING GLOVES 5er-Packung

Produkt-Nummer: Ao4o7o-5 (UDI-DI: o8717127938o7o) / Bo4o7o-5 (UDI-DI: o8717127937738)


Benutzer: Professionelle Anwender oder Gesundheitsdienstleister

Verwendungszweck:

Swash[®] Bathing Gloves sind für die Ganzkörperwäsche inkontinenter und/oder bettlägeriger Patienten als Maßnahme zur Infektionsprävention vorgesehen.

Hilfsmittel:

- Einweghandschuhe
- Abfalleimer
- Papiertücher (falls erforderlich)
- Inkontinenzprodukte (falls erforderlich)
- Saubere Kleidung und/oder Bettwäsche (falls erforderlich)
- Mikrowelle (falls erforderlich)

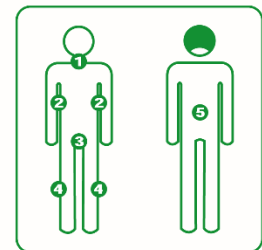

Gebrauchsanweisung:

Benutzen Sie für jeden Körperteil einen Waschhandschuh (siehe Piktogramm). Falls gewünscht, kann die Packung in der Mikrowelle erwärmt werden. Prüfen Sie die Temperatur vor dem Gebrauch. Jede Packung darf nur für eine Person verwendet werden. Eine detaillierte Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben.

Detaillierte Vorgehensweise:

Swash[®]-Waschhandschuhe können zentral auf der Station oder neben dem Bett des Pflegebedürftigen gelagert und sowohl erwärmt als auch bei Raumtemperatur verwendet werden. Je nach Mobilität des Pflegebedürftigen ist auch eine andere Reihenfolge möglich, vorausgesetzt, jeder Körperteil (siehe Piktogramm oben) wird mit einem eigenen Waschhandschuh gewaschen. Ein Abtrocknen ist nicht erforderlich. Die Haut trocknet von selbst durch die Verdunstung der Lotion. Falls erforderlich, trocknen Sie die Hautfalten durch Abtupfen mit einem Papiertuch.

- 1 Erwärmen Sie die Swash[®] Bathing Gloves auf die gewünschte Temperatur. Die empfohlene Temperatur erreichen Sie, indem Sie die Packung bei maximal 800 Watt für 15 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen.
- 2 Erklären Sie der pflegebedürftigen Person, was Sie vorhaben und reden Sie während des gesamten Waschvorgangs mit ihm/ihr.
- 3 Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie beginnen und ziehen Sie sich die Einweghandschuhe an.
- 4 Bringen Sie den Pflegebedürftigen in Rückenlage und legen Sie ein Kissen unter seinen/ihren Kopf. Lassen Sie den Pflegebedürftigen die Oberbekleidung ausziehen. Helfen Sie dem Pflegebedürftigen bei Bedarf. Berücksichtigen Sie die Privatsphäre des Pflegebedürftigen.
- 5 Öffnen Sie die Packung mit den Swash[®] Bathing Gloves und entnehmen einen Waschhandschuh. Prüfen Sie die Temperatur des Waschhandschuhs. Denken Sie daran, dass die Einweghandschuhe Ihre Hitzeempfindlichkeit verringern.
- 6 **Waschhandschuh 1:** Legen Sie den Waschhandschuh auf das Handgelenk oder den Handrücken des Patienten. Fragen Sie ihn/sie, ob die Temperatur für ihn/sie angenehm ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie warten, bis der Waschhandschuh eine für den Patienten angenehme Temperatur erreicht hat. Verwenden Sie beide Seiten des Waschhandschuhs, um Gesicht, Nacken und Brust zu waschen. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
- 7 **Waschhandschuh 2:** Waschen Sie zuerst den Arm, der sich an Ihrer Seite befindet. Gehen Sie zur anderen Seite des Bettes und waschen Sie den Arm, der sich nun an Ihrer Seite befindet.

Achtung: Verwenden Sie beide Seiten des Waschhandschuhs. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.

- 8 **Waschhandschuh 3:** Falls zutreffend, entfernen Sie vorhandenes Inkontinenzmaterial und waschen Sie die Genitalien mit beiden Seiten des Waschhandschuhs. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
- 9 **Waschhandschuh 4:** Waschen Sie zuerst das Bein, das sich an Ihrer Seite befindet. Gehen Sie zur anderen Seite des Bettes und waschen Sie das Bein, das sich nun an Ihrer Seite befindet. Achtung: Verwenden Sie beide Seiten des Waschhandschuhs. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
- 10 **Waschhandschuh 5:** Bitten Sie den Patienten, sich auf die Seite zu drehen und bieten Sie ggf. Unterstützung an. Waschen Sie den Rücken und das Gesäß, indem Sie beide Seiten des Waschhandschuhs verwenden. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
- 11 Kleiden Sie den Pflegebedürftigen wieder an und legen ihn/sie in die gewünschte Position.
- 12 Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschhandschuhe im Abfalleimer. Achtung: Die Waschhandschuhe dürfen NIEMALS IN DER TOILETTE entsorgt werden!
- 13 Notieren Sie eventuelle Anmerkungen.

ACHTUNG:

- Nehmen Sie zu jeder Zeit Rücksicht auf die Bedürfnisse und Schamgefühle des Pflegebedürftigen.
- Jede Packung darf nur für **eine** Person verwendet werden. Aufgrund der Infektionsgefahr wird davon abgeraten, geöffnete Packungen aufzuheben oder wiederzuverwenden.
- Es wird strengstens empfohlen, eine geöffnete Packung innerhalb von 48 Stunden aufzubauchen. Sollten in der Packung Waschhandschuhe übrig sein, notieren Sie bitte Datum und Uhrzeit auf der Packung und verwenden diese innerhalb von 48 Stunden für den gleichen Patienten, zum Beispiel zum Frischmachen am Abend.
- Befolgen Sie die richtige Vorgehensweise für das Waschen des Körpers. Verwenden Sie für jeden Körperteil einen neuen Waschhandschuh. Dadurch senken Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen.
- Die Waschhandschuhe sind nur für die äußerliche Anwendung vorgesehen.
- Seien Sie vorsichtig beim Waschen der Augen.
- Wenn Sie die Swash® Bathing Gloves in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf der Packung erwärmen, müssen Sie die Temperatur der Waschhandschuhe prüfen, bevor Sie sie auf der Haut anwenden. Sind die Swash® Bathing Gloves heiß, dürfen sie nicht sofort verwendet werden. Denken Sie daran, dass das Tragen von Einweghandschuhen Ihr Hitzeempfinden verringert. Prüfen Sie die Temperatur insbesondere bei Kleinkindern oder Personen, die nicht reagieren können oder bei Personen, die eine empfindliche Haut haben.
- **Entsorgen Sie die Waschhandschuhe nicht in der Toilette. Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschhandschuhe im Abfalleimer.**

GEGENANZEIGEN:

- Wenn der Pflegebedürftige die Anwendung ablehnt
- Wenn bekannt ist, dass der Pflegebedürftige empfindlich oder allergisch auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagiert
- Auf nicht intakter Haut und offenen Wunden



PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG:

	Temperaturbegrenzung		UDI Nummer (Unique device identifier)
	Vor Lichteinstrahlung schützen		Innerhalb von 48 Std. aufbrauchen
	Vor Nässe schützen		In den Mülleimer werfen
	Nicht verwenden wenn Verpackung beschädigt ist. Gebrauchsanweisung beachten.		Nicht auflösend
	Nicht zur Wiederverwendung		Hinweis zum Erwärmen
	Nicht steril		Frei von Latex
	Medizinprodukt		In Clean Room produziert
	Konformitätszeichen		Das Produkt enthält keine Duftstoffe
	Chargennummer		Das Produkt enthält Duftstoffe
	Hersteller		Nicht in Toilette entsorgen
	Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung oder elektr. Gebrauchsanweisung beachten

Die Informationen in diesen Anweisungen gelten insbesondere für die Verwendung der Swash® Bathing Gloves für das Waschen von bettlägerigen Pflegebedürftigen. Gemäß den Anweisungen und Richtlinien in Ihrer Pflegeeinrichtung kann diese Anweisung um weitere Maßnahmen und Schritte ergänzt werden.