

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## SWASH<sup>®</sup> BATHING WIPES 8er-Packung

Produkt-Nummer: Ao4o28-8 (UDI-DI: o8717127936854) / Bo4o28-8 (UDI-DI: o8717127937134) / Po4o28-8 (UDI-DI: o872o66361o69o)


**Benutzer:** Professionelle Anwender oder Gesundheitsdienstleister

### Verwendungszweck:

Swash<sup>®</sup> Bathing Wipes sind für die Ganzkörperwäsche inkontinenter und/oder bettlägeriger Patienten als Maßnahme zur Infektionsprävention vorgesehen.

### Hilfsmittel:

- Einweghandschuhe
- Abfalleimer
- Papiertücher (falls erforderlich)
- Inkontinenzprodukte (falls erforderlich)
- Saubere Kleidung und/oder Bettwäsche (falls erforderlich)
- Mikrowelle (falls erforderlich)

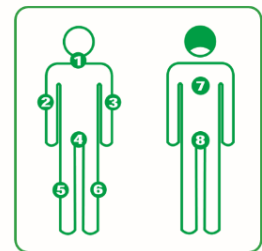

### Gebrauchsanweisung:

Benutzen Sie für jeden Körperteil einen Waschtücher (siehe Piktogramm). Falls gewünscht, kann die Packung in der Mikrowelle erwärmt werden. Prüfen Sie die Temperatur vor dem Gebrauch. Jede Packung darf nur für eine Person verwendet werden. Eine detaillierte Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben.

### Detaillierte Vorgehensweise:

Swash<sup>®</sup>-Waschtücher können zentral auf der Station oder neben dem Bett des Pflegebedürftigen gelagert und sowohl erwärmt als auch bei Raumtemperatur verwendet werden. Je nach Mobilität des Pflegebedürftigen ist auch eine andere Reihenfolge möglich, vorausgesetzt, jeder Körperteil (siehe Piktogramm oben) wird mit einem eigenen Waschtuch gewaschen. Ein Abtrocknen ist nicht erforderlich. Die Haut trocknet von selbst durch die Verdunstung der Lotion. Falls erforderlich, trocknen Sie die Hautfalten durch Abtupfen mit einem Papiertuch.

- 1 Erwärmen Sie die Swash<sup>®</sup> Bathing Wipes auf die gewünschte Temperatur. Die empfohlene Temperatur erreichen Sie, indem Sie die Packung bei maximal 800 Watt für 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen.
- 2 Erklären Sie der pflegebedürftigen Person, was Sie vorhaben und reden Sie während des gesamten Waschvorgangs mit ihm/ihr.
- 3 Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie beginnen und ziehen Sie sich die Einweghandschuhe an.
- 4 Bringen Sie den Pflegebedürftigen in Rückenlage und legen Sie ein Kissen unter seinen/ihren Kopf. Lassen Sie den Pflegebedürftigen die Oberbekleidung ausziehen. Helfen Sie dem Pflegebedürftigen bei Bedarf. Berücksichtigen Sie die Privatsphäre des Pflegebedürftigen.
- 5 Öffnen Sie die Packung mit den Swash<sup>®</sup> Bathing Wipes und entnehmen ein Waschtuch. Prüfen Sie die Temperatur des Waschtuchs. Denken Sie daran, dass die Einweghandschuhe Ihre Hitzeempfindlichkeit verringern.
- 6 **Waschtuch 1:** Legen Sie das Waschtuch auf das Handgelenk oder den Handrücken des Patienten. Fragen Sie ihn/sie, ob die Temperatur für ihn/sie angenehm ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie warten, bis das Waschtuch eine für den Patienten angenehme Temperatur erreicht hat. Verwenden Sie beide Seiten des Waschtuchs, um Gesicht, Nacken und Brust zu waschen. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
- 7 **Waschtuch 2:** Waschen Sie die Hand, den Arm und die Achselhöhle, die sich an Ihrer Seite

- befinden. Beginnen Sie am Handgelenk und waschen Sie die Armoberseite mit kreisenden
- 8 Bewegungen bis zur Achselhöhle. Kehren Sie das Waschtuch um, waschen Sie die Armunterseite und beenden dies bei der Hand. Achtung: Verwenden Sie beide Seiten des Waschtuchs. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
  - 9 **Waschtuch 3:** Gehen Sie zur anderen Seite des Bettes und waschen Sie die Hand, den Arm und die Achselhöhle die sich jetzt an Ihrer Seite befinden und wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
  - 10 **Waschtuch 4:** Falls zutreffend, entfernen Sie vorhandenes Inkontinenzmaterial und waschen Sie die Genitalien mit beiden Seiten des Waschtuchs. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
  - 11 **Waschtuch 5:** Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschtuchs das Bein und den Fuß, die sich an Ihrer Seite befinden. Beginnen Sie am Fußgelenk und waschen Sie mit kreisenden Bewegungen die Beinoberseite bis zur Leiste. Kehren Sie das Waschtuch um, waschen Sie die Beinunterseite von oben bis zum Fuß. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
  - 12 **Waschtuch 6:** Gehen Sie zur anderen Seite des Bettes und waschen Sie mit beiden Seiten des Waschtuchs das Bein und den Fuß, die sich jetzt an Ihrer Seite befinden und wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
  - 13 **Waschtuch 7:** Bitten Sie den Patienten, sich auf die Seite zu drehen und bieten Sie nötigenfalls Hilfe an. Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschtuchs den Rücken des Pflegebedürftigen. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
  - 14 **Waschtuch 8:** Waschen Sie das Gesäß und das Steißbein des Pflegebedürftigen mit beiden Seiten des Waschtuchs. Falls zusätzlicher Pflegebedarf besteht, verwenden Sie die passenden Inkontinenzprodukte. Nach dem Waschen werfen Sie das Waschtuch weg.
  - 15 Kleiden Sie den Pflegebedürftigen wieder an und legen ihn/sie in die gewünschte Position.
  - 16 Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschtücher im Abfalleimer. Achtung: Die Waschtücher dürfen NIEMALS IN DER TOILETTE entsorgt werden!
  - 17 Notieren Sie eventuelle Anmerkungen.

#### ACHTUNG:

- Nehmen Sie zu jeder Zeit Rücksicht auf die Bedürfnisse und Schamgefühle des Pflegebedürftigen.
- Jede Packung darf nur für **eine** Person verwendet werden. Aufgrund der Infektionsgefahr wird davon abgeraten, geöffnete Packungen aufzuheben oder wiederzuverwenden.
- Es wird strengstens empfohlen, eine geöffnete Packung innerhalb von 48 Stunden aufzubrauchen. Sollten in der Packung Waschtücher übrig sein, notieren Sie bitte Datum und Uhrzeit auf der Packung und verwenden diese innerhalb von 48 Stunden für den gleichen Patienten, zum Beispiel zum Frischmachen am Abend.
- Befolgen Sie die richtige Vorgehensweise für das Waschen des Körpers. Verwenden Sie für jeden Körperteil ein neues Waschtuch. Dadurch senken Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen.
- Die Waschtücher sind nur für die äußerliche Anwendung vorgesehen.
- Seien Sie vorsichtig beim Waschen der Augen.
- Wenn Sie die Swash® Bathing Wipes in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf der Packung erwärmen, müssen Sie die Temperatur der Waschtücher prüfen, bevor Sie sie auf der Haut anwenden. Sind die Swash® Bathing Wipes heiß, dürfen sie nicht sofort verwendet werden. Denken Sie daran, dass das Tragen von Einweghandschuhen Ihr Hitzeempfinden verringert. Prüfen Sie die Temperatur insbesondere bei Kleinkindern oder Personen, die nicht reagieren können oder bei Personen, die eine empfindliche Haut haben.
- **Entsorgen Sie die Waschtücher nicht in der Toilette. Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschtücher im Abfalleimer.**

## GEGENANZEIGEN:

- Wenn der Pflegebedürftige die Anwendung ablehnt
- Wenn bekannt ist, dass der Pflegebedürftige empfindlich oder allergisch auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagiert
- Auf nicht intakter Haut und offenen Wunden

## PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG:

	Temperaturbegrenzung		UDI Nummer (Unique device identifier)
	Vor Lichteinstrahlung schützen		Innerhalb von 48 Std. aufbrauchen
	Vor Nässe schützen		In den Mülleimer werfen
	Nicht verwenden wenn Verpackung beschädigt ist. Gebrauchsanweisung beachten.		Nicht auflösend
	Nicht zur Wiederverwendung		Hinweis zum Erwärmen
	Nicht steril		Frei von Latex
	Medizinprodukt		In Clean Room produziert
	Konformitätszeichen		Das Produkt enthält keine Duftstoffe
	Chargennummer		Das Produkt enthält Duftstoffe
	Hersteller		Nicht in Toilette entsorgen
	Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung oder elektr. Gebrauchsanweisung beachten

Die Informationen in diesen Anweisungen gelten insbesondere für die Verwendung der Swash® Bathing Wipes für das Waschen von bettlägerigen Pflegebedürftigen. Gemäß den Anweisungen und Richtlinien in Ihrer Pflegeeinrichtung kann diese Anweisung um weitere Maßnahmen und Schritte ergänzt werden.