

Gebruiksaanwijzing

SWASH[®] BATHING WIPES 8-pack

Product code: Ao4o28-8 (UDI-DI: o8717127936854) / Bo4o28-8 (UDI-DI: o8717127937134) / Po4o28-8 (UDI-DI: o872o66361o69o)


Gebruiker: professioneel gebruik of zorgverlener

Beoogd gebruik:

Swash[®] Bathing Wipes zijn bedoeld voor een volledige lichaamswassing bij incontinenten en / of bedlegerige patiënten als een maatregel ter preventie van infectie

Ondersteunende materialen:

- Wegwerpdoekjes
- Afvalbak
- Tissues (indien nodig)
- Incontinentieproducten (indien nodig)
- Schone kledingen en/of linnengoed (indien nodig)
- Magnetron (indien nodig)

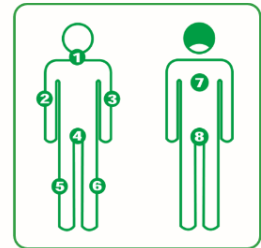

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik 1 doekje per lichaamsdeel (zie pictogram). Indien gewenst kan het pakketje opgewarmd worden in de magnetron. Controleer de temperatuur vóór gebruik. Ieder pakketje dient persoonsgebonden gebruikt te worden.

Gedetailleerde procedure:

Swash[®] Bathing Wipes kunnen centraal op de afdeling of naast het bed van de zorgvrager worden opgeslagen kunnen zowel verwarmd als op kamertemperatuur worden gebruikt. Hierdoor staat de procedure van wassen met Swash beschreven. Afhankelijk van de mobiliteit van de patiënt is het ook mogelijk een andere volgorde aan te houden, mits dat ieder lichaamsdeel (zie afbeelding) gewassen wordt met een apart doekje.

- 1 Informeer de zorgvrager wat je gaat doen en blijf communiceren tijdens gehele lichaamswassing.
- 2 Verwarm de Swash[®] Bathing Wipes op de gewenste temperatuur. De gebruikelijke temperatuur wordt bereikt door de verpakking op maximaal 800 watt gedurende 30 seconden in een magnetron te verwarmen.
- 3 Voorafgaand, was uw handen en trek een paar wegwerphandschoenen aan.
- 4 Denk aan de privacy van de patiënt. Laat de patiënt een rugligging aannemen met een kussen onder het hoofd. Laat de patiënt de bovenkleding uittrekken, indien nodig de patiënt hierbij helpen/ondersteunen. Sla de deken terug tot aan het onderlichaam.
- 5 Open de verpakking door de sluiting open te trekken en controleer de temperatuur van het doekje. Let op, handschoenen verminderen uw gevoeligheid voor warmte.
- 6 **Wasdoek 1:** breng de wasdoek aan op de pols of bovenkant hand van de patiënt. Vraag aan de patiënt of de temperatuur aangenaam is. Zo ja, dan kunt u verder met het wassen. Zo nee, wacht tot de wasdoek een aangename temperatuur heeft bereikt voor de patiënt. Let op, houd gedurende de gehele lichaamswassing rekening met het comfort van de patiënt.
- 7 Gebruik beide kanten van wasdoek 1 voor het wassen van het gezicht, hals en borst. Afdrogen is niet nodig. De huid droogt vanzelf door het vervluchtigen van de lotion. Indien nodig de huidplooiën nadrogen door te deppen met een tissue. Na het wassen de wasdoek weggooien.
- 8 **Wasdoek 2:** was de arm en oksel van de patiënt die het dichtst bij u ligt. Gebruik beide kanten van de wasdoek. De huid droogt vanzelf door het vervluchtigen van de lotion. Na het wassen de wasdoek weggooien.

- 9 **Wasdoek 3:** was met beide kanten van de wasdoek de andere arm en oksel van de patiënt beginnend bij de hand. De huid droogt vanzelf door het vervluchtigen van de lotion. Indien nodig de huidplooien nadrogen door te deppen met een tissue. Na het wassen de wasdoek weggooien.
- 10 **Wasdoek 4:** indien van toepassing, verwijder het incontinentiemateriaal en was met beide kanten van de wasdoek de genitaliën. De huid droogt vanzelf door het vervluchtigen van de lotion. Indien nodig de huidplooien nadrogen door te deppen met een tissue. Na het wassen de wasdoek weggooien.
- 11 **Wasdoek 5:** was met beide kanten van de wasdoek het been dat het dichtst bij u ligt van de enkel naar de heup en daarna de voeten. De huid droogt vanzelf door het vervluchtigen van de lotion. Indien nodig de huidplooien nadrogen door te deppen met een tissue. Na het wassen de wasdoek weggooien.
- 12 **Wasdoek 6:** Was met beide kanten van de wasdoek het andere been van de enkel naar de heup en daarna de voeten. De huid droogt vanzelf door het vervluchtigen van de lotion. Indien nodig de huidplooien nadrogen door te deppen met een tissue. Na het wassen de wasdoek weggooien.
- 13 **Wasdoek 7:** Vraag de patiënt om op zijn/haar zij te liggen indien nodig met ondersteuning. Was de rug van de patiënt met beide kanten van de wasdoek. Na het wassen de wasdoek weggooien
- 14 **Wasdoek 8:** Was de billen en stuit van de patiënt met beide kanten van de wasdoek. Indien extra verzorging vereist is gebruik dan de juiste incontinentie producten. Na het wassen de wasdoek weggooien.
- 15 Kleed de patiënt weer aan en leg hem/haar in de gewenste positie.
- 16 Gooi het lege pakketje Swash® samen met de handschoenen in de afvalcontainer. Let op, de doekjes mogen NIET DOOR HET TOILET GESPOELD worden!
- 17 Rapporteer eventuele opmerkingen.

Waarschuwing:

- Houd te allen tijde rekening met de behoeften, gevoelens en privacy van de patiënt.
- Ieder pakketje dient persoonsgebonden te worden gebruikt. Het bewaren en hergebruiken van geopende pakketjes wordt afgeraden in verband met infectiepreventie. Bij dezelfde patiënt en bijvoorbeeld voor een opfrisbeurt 's avonds kunnen de overgebleven doekjes gebruikt worden.
- Volg de juiste procedure voor de lichaamswassen. Door steeds een nieuw doekje per lichaamsdeel te gebruiken vermindert dit ook de kans op kruisbesmetting.
- Wees voorzichtig bij het wassen van de ogen.
- Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.
- Geadviseerd wordt een geopend pakje binnen 48 uur op te maken.
- Wanneer de Swash® Bathing Wipes worden verwarmd volgens de instructies op de verpakking dan is het belangrijk de temperatuur van de doekjes te controleren voordat deze op de huid worden gebruikt. Wanneer de Swash® Bathing Wipes te heet zijn, kunnen deze niet meteen gebruikt worden. Onthoud dat het dragen van handschoenen de ervaring van warmte vermindert. Besteed extra aandacht aan het controleren van de temperatuur bij kinderen of personen niet kunnen reageren of personen met een gevoelige huid.
- Spoel de doekjes niet door het toilet. Gooi het lege pakket Swash® en de handschoenen in de prullenbak.

CONTRA-INDICATIES:

- Als de zorgvrager het gebruik hiervan weigert
- Als bekend is dat de zorgontvanger gevoelig of allergisch is voor een of meerdere ingrediënten
- Op niet-intacte huid & open wonden



PICTOGRAMMEN OP HET PAKKETJE:

	Beperking temperatuur		Gebruik binnen 48 uur na opening
	Verwijderd houden van zonlicht		Gooi maar in de vuilnisbak.
	Droog houden		Niet macereren
	Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd		Advies over verwarming
	Niet hergebruiken		Product vrij van latex
	Niet-steriel		Geproduceerd in een clean room
	Medisch hulpmiddel		Het product bevat geen parfum
	CE-markering		Het product bevat parfum
	Batchcode		Niet doorspoelen
	Fabrikant		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Te gebruiken tot datum		
	Unieke identificatiecode		

De informatie in dit protocol heeft specifiek betrekking op het gebruik van Swash® Bathing Wipes voor reinigen en verzorgen van bedlegerige patiënten. Additionele interventies en stappen kunnen aan dit protocol worden toegevoegd naargelang andere protocollen en richtlijnen in uw zorginstelling.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherlands
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com