

# Gebruiksaanwijzing

## SWASH<sup>®</sup> PERINEUM WIPES 4 & 8-pack

Product code: Co4533-4 (UDI-DI: o8717127937158) / Co4533-8 (UDI-DI: o8717127937165)


**Gebruiker:** professioneel gebruik of zorgverlener.

### Beoogd gebruik:

Vochtige wasdoekjes bedoeld voor perineale verzorging van incontinentie patiënten als maatregel om huidbeschadiging door blootstelling aan urine of ontlasting (IAD) te voorkomen of als maatregel om dergelijke huidbeschadiging (IAD) in een vroeg stadium te beheersen.

### Benodigde hulpmiddelen:

- Swash<sup>®</sup> Perineum Wipes 4-pack/ 8-pack
- Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes of andere vochtige doekjes, papieren doekjes (indien nodig)
- Incontinentiemateriaal (indien nodig)
- Schone kleren en/of beddengoed (indien nodig)
- Afvalcontainer
- Magnetron (indien nodig)
- Wegwerphandschoenen Disposable wipes

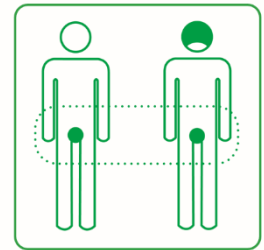

### Gebruiksaanwijzing:

Gebruik voldoende wasdoekjes om het vervuilde perineumgebied te reinigen (zie pictogram). Indien gewenst kan de verpakking in de magnetron worden opgewarmd. Controleer de temperatuur vóór gebruik. Gebruik elk pakje slechts voor één persoon.

### Procedure:

De Swash<sup>®</sup> Perineum Wipes kunnen centraal op de afdeling of naast het bed van de zorgvrager worden opgeslagen. De Swash<sup>®</sup> Perineum Wipes kunnen zowel verwarmd als op kamertemperatuur worden gebruikt.

- 1 Informeer de zorgvrager wat je gaat doen en blijf communiceren tijdens de gehele procedure.
- 2 Verwarm de Swash<sup>®</sup> Perineum Wipes op de gewenste temperatuur. De gebruikelijke temperatuur wordt bereikt door de verpakking op maximaal 800 watt gedurende 20 seconden (8-pack) of 15 seconden (4-pack) in een magnetron te verwarmen.
- 3 Voorafgaand, was uw handen en trek een paar wegwerphandschoenen aan. Raadpleeg het huidige handhygiëne protocol voor meer informatie.
- 4 Vraag de zorgvrager om een liggende houding aan te nemen met een kussen onder zijn/haar hoofd. Vraag de zorgvrager om zijn/haar kleding uit te doen; indien nodig, biedt hulp/ondersteuning. Denk hierbij aan de privacy van de zorgvrager.
- 5 Verwijder nat en vuil incontinentiemateriaal.
- 6 Indien nodig, kunnen grote hoeveelheden ontlasting voorzichtig worden weggenomen met Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes, tissues, doekjes, etc.
- 7 Open de verpakking Swash<sup>®</sup> Perineum Wipes en haal een wasdoekje eruit. Controleer de temperatuur van het wasdoekje. Let op, handschoenen verminderen uw gevoeligheid voor warmte.
- 8 Was de genitaliën met een Swash<sup>®</sup> Perineum Wipe. De huid droogt vanzelf door het vervluchtigen van de lotion. Indien nodig de huidplooien nadrogen door te deppen met een tissue.
- 9 Vraag de zorgvrager om op zijn/haar zij te liggen, indien nodig met ondersteuning.
- 10 Reinig de verontreinigde perineum strek met een Swash<sup>®</sup> Perineum Wipe van voor naar achter. Gebruik zo veel wasdoekjes als nodig voor het verwijderen van alle ontlasting en/of urine van de

- huid. Leg de gebruikte Swash® Perineum Wipes bij voorkeur bij het incontinentiemateriaal of stop het hierin. Verwijder het incontinentiemateriaal gezamenlijk met de doekjes volgens het protocol.
- 11 Voor een optimaal resultaat, gebruik een schone Swash® Perineum Wipe voor een laatste reiniging. Dit laat een beschermende laag achter op de huid.
  - 12 Inspecteer de perineum streek op Incontinentie Dermatitis en andere huidconditie variabelen.
  - 13 Rapporteer eventuele veranderingen in de conditie van de huid na de onderwassing.
  - 14 Geef de zorgvrager nieuw, schoon en droog incontinentiemateriaal. Zorg dat de huid droog is voor nieuw incontinentiemateriaal wordt aangetrokken. Verschoon het beddengoed indien dit nat of bevuild is. Kleed de zorgvrager weer aan en leg hem/haar in de gewenste positie.
  - 15 Gooi het lege pakketje Swash® Perineum samen met de handschoenen in de afvallemmer. Let op, de Swash® Perineum Wipes / Swash® Cleansing Wipes mogen niet door het toilet gespeld worden!
  - 16 Herhaal deze procedure elke keer na een urine- of ontlastingsincontinentie-episode.

### Waarschuwing:

- Houd te allen tijde rekening met de behoeften en gevoelens van schaamte van de patiënt.
- Ieder pakketje dient persoonsgebonden te worden gebruikt.
- **Spoel de wasdoekjes niet door het toilet. Gooi het lege pakket Swash® en de wasdoekjes in de vuilnisbak.**
- Niet in de ogen gebruiken.
- Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.
- Geadviseerd wordt een geopend pakje binnen 48 uur op te maken. Indien wasdoekjes overblijven, schrijf de datum en tijd op het pakketje en gebruik de resterende wasdoekjes binnen 48 uur.
- Wanneer de Swash® Perineum Wipes worden verwarmd volgens de instructies op de verpakking dan is het belangrijk de temperatuur van de wasdoekjes te controleren voordat deze op de huid worden gebruikt. Wanneer de Swash® Perineum Wipes te heet zijn, kunnen deze niet meteen gebruikt worden. Onthoud dat het dragen van handschoenen de ervaring van warmte vermindert. Besteed extra aandacht aan het controleren van de temperatuur bij kinderen of personen niet kunnen reageren of personen met een gevoelige huid.

### CONTRA-INDICATIES:

- Als de zorgvrager het gebruik hiervan weigert
- Als bekend is dat de zorgontvanger gevoelig of allergisch is voor een of meerdere ingrediënten
- Op niet-intacte huid & open wonden



## PICTOGRAMMEN OP HET PAKKETJE:

	Beperking temperatuur		Gebruik binnen 48 uur na opening
	Verwijderd houden van zonlicht		Gooi maar in de vuilnisbak.
	Droog houden		Niet macereren
	Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd		Advies over verwarming
	Niet hergebruiken		Product vrij van latex
	Niet-steriel		Geproduceerd in een clean room
	Medisch hulpmiddel		Het product bevat geen parfum
	CE-markering		Niet doorspoelen
	Batchcode		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant		
	Te gebruiken tot datum		
	Unieke identificatiecode		

*De informatie in dit protocol heeft specifiek betrekking op het gebruik van Swash® Perineum Wipes voor reinigen en verzorgen van bedlegerige patiënten. Additionele interventies en stappen kunnen aan dit protocol worden toegevoegd naargelang andere protocollen en richtlijnen in uw zorginstelling.*

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherlands  
+31 (0)45 209 4000 • [manufacturing@arion-group.com](mailto:manufacturing@arion-group.com) • [www.arion-group.com](http://www.arion-group.com)