

GEBRUIKSAANWIJZING SWASH[®] SHAMPOO CAP

Product code: Do4077-1 (UDI-DI: 08717127937219) / Go4077-1 (UDI-DI: 08717127937929)

Gebruiker: Professioneel gebruik of zorgverlener

Beoogd gebruik:

Swash[®] Shampoo Cap is bedoeld voor een complete haarwassing van bedlegerige patiënten al seen maatregel ter preventie van infectie.

Ondersteunende materialen:

- Wegwerphandschoenen
- Afvalbak
- Handdoek
- Fijne kam
- Magnetron (indien nodig)

Gebruiksaanwijzing:

Controleer de temperatuur vóór gebruik. Breng de cap op het hoofd aan en zorg ervoor dat alle haren bedekt zijn. Masseer zachtjes met de cap het haar gedurende 2-3 minuten en verzadig zo het haar met shampoo. Verwijder de cap, naspoelen is overbodig. Droog het haar en breng het op de gebruikelijke manier in model.

Gedetailleerde procedure:

De Swash[®] Shampoo Cap kan centraal op de afdeling of naast het bed van de zorgvrager worden opgeslagen en kunnen zowel verwarmd als op kamertemperatuur worden gebruikt.

- 1 Informeer de zorgvrager wat je gaat doen en blijf communiceren tijdens de gehele haarwassing.
- 2 Verwarm de Swash[®] Shampoo Cap op de gewenste temperatuur. De gebruikelijke temperatuur wordt bereikt door de verpakking op maximaal 800 watt gedurende 30 seconden in een magnetron te verwarmen.
- 3 Voorafgaand, was uw handen en trek een paar wegwerphandschoenen aan.
- 4 Indien mogelijk, breng de zorgvrager in een comfortabel zithouding.
- 5 Open de verpakking en controleer de temperatuur van de badmuts. Let op, handschoenen verminderen uw gevoeligheid voor warmte.
- 6 Verwijder indien nodig eerst grote hoeveelheden bloed, gel of vuil en plaats vervolgens de badmuts op het hoofd. Zorg bij lang haar dat al het haar bovenop het hoofd zit alvorens u de badmuts op het hoofd zet. Zorg ervoor dat alle haren in de badmuts zitten.
- 7 Masseer zachtjes met de badmuts het haar gedurende 2-3 minuten en verzadig zo het haar met shampoo.
- 8 De duur van masseren is afhankelijk van de lengte en hoeveelheid van het haar.
- 9 Verwijder de badmuts, het haar goed nadrogen met een handdoek en uitkammen met fijne kam. Breng het haar vervolgens op de gebruikelijke manier in model.
- 10 Gooi het lege pakketje samen met de handschoenen in de afvalcontainer. Let op, de badmuts **MAG NIET DOOR HET TOILET GESPOELD WORDEN!**

WAARSCHUWING:

- Houd te allen tijde rekening met de behoeften, gevoelens en privacy van de patiënt.
- Ieder pakketje dient persoonsgebonden te worden gebruikt.
- Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.
- Wanneer de Swash[®] Shampoo Cap worden verwarmd volgens de instructies op de verpakking dan is het belangrijk de temperatuur van de badmuts te controleren voordat deze op de huid worden

gebruikt. Wanneer de Swash® Shampoo Cap te heet is, kan deze niet meteen gebruikt worden. Onthoud dat het dragen van handschoenen de ervaring van warmte verminderd. Besteed extra aandacht aan het controleren van de temperatuur bij kinderen of personen die niet kunnen reageren of personen met een gevoelige huid.

- Spoel de badmuts niet door het toilet. Gooi het lege pakket Swash® en de badmuts in de prullenbak.

CONTRA-INDICATIES:

- Als de zorgvrager het gebruik hiervan weigert
- Als bekend is dat de zorgontvanger gevoelig of allergisch is voor een of meerdere ingrediënten
- Op niet-intacte huid & open wonden



PICTOGRAMMEN OP HET PAKKETJE:

	Beperking temperatuur		Spoel de ogen als er product in komt
	Verwijderd houden van zonlicht		Gooi maar in de vuilnisbak.
	Droog houden		Niet macereren
	Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd		Advies over verwarming
	Niet hergebruiken		Product vrij van latex
	Niet-steriel		Geproduceerd in een clean room
	Medisch hulpmiddel		Het product bevat geen parfum
	CE-markering		Het product bevat parfum
	Batchcode		Niet doorspoelen
	Fabrikant		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Te gebruiken tot datum		
	Unieke identificatiecode		

De informatie in dit protocol heeft specifiek betrekking op het gebruik van de Swash® Shampoo Cap voor reiniging en verzorgen van het haar van bedlegerige zorgvragers. Additionele interventies en stappen kunnen aan dit protocol worden toegevoegd naargelang andere protocollen en richtlijnen in uw zorginstelling.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherland
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com